

Locatie Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

NOGBS studie_Kind

mIn-trialnr: 125-MLN-36-KC-12-2019-NOGBS

Artscodet: TNOG01

Datum: _____

Studie-ID: _____

AANVRAGER

- Plak een patiëntensticker van het kind bovenaan dit formulier;
- Vul hierboven de datum en studie-ID van het kind in;
- Noteer de datum op de etiketten van de verdeelbuisjes;
- Breng de afgenomen stolbuis/stolbuizen + EDTA buis en de geëtiketteerde verdeelbuisjes met dit formulier in een afnamesetje naar het afname lab van Certe in het Martini Ziekenhuis, Van Swietenplein 1, route 0.1.

INNAME

- Neem het afnamesetje in ontvangst met daarin de stolbuis/stolbuizen, EDTA buis en de geëtiketteerde verdeelbuisjes.
Indien hierover vragen zijn kan contact worden opgenomen met kinderarts Rienus Doedens via (050) 524 7927 en secretariaat (050) 524 6039 of R.Doedens@mzh.nl.

AANVRAAGVERWERKING

- Met functie A, wordt in Labosys ingebracht:
 - o Patiëntgegevens: **Studie-ID** (zie hierboven)
 - o Artscodet: **TNOG01**
 - o Bij opmerking rapportage: **Studie-ID** (zie hierboven)
 - o Testcode: **TNOG1**

MONSTERBEHANDELING

Materiaal	Centrifugeren APO05405, progr.nr. 1	Verdelen	Opslag
1 à 2 stolbuisjes + 1 EDTA buisje	Afdraaien op routine programma	Afpipetteren en overbrengen in de geëtiketteerde verdeelbuisjes	Invriezen -80°C

ANALYSE

N.v.t.

RAPPORTAGE

N.v.t.

OPSLAG

Invriezen in -80 vriezer. Monsters worden 3x per jaar opgehaald door het studieteam, tenzij Certe aangeeft dat het omwille van de ruimte in de vriezer eerder moet worden opgehaald.

BEWAREN FORMULIEREN

Dit formulier bewaren in de blauwe map, getiteld 'NOGBS', te vinden op de administratie van het laboratorium.

Bijzonderheden
