

Locatie Martini Ziekenhuis  
Van Swietenplein 1  
9728 NT Groningen

## NOGBS studie\_Moeder

mIn-trialnr: 125-MLN-36-KC-12-2019-NOGBS

Artscod: TNOG01

Datum: \_\_\_\_\_

Studie-ID: \_\_\_\_\_

### AANVRAGER

- Plak een patiëntensticker van de deelnemer bovenaan dit formulier;
- Vul hierboven de datum en studie-ID van de deelnemer in;
- Noteer de datum op de etiketten van de verdeelbuisjes;
- Verwijs de deelnemer met de geëtiketteerde cupjes moedermelk, cupjes urine, de verdeelbuisjes en dit formulier naar het afname lab van Certe in het Martini Ziekenhuis, Van Swietenplein 1, route 0.1.

### INNAME + AFNAME

- Neem de geëtiketteerde cupjes moedermelk, urine en de verdeelbuisjes voor het bloed in ontvangst;
- Neem 2 stuks rode buizen af van 6ml.

### AANVRAAGVERWERKING

- Met functie A, wordt in Labosys ingebracht:
  - o Patiëntgegevens: **Studie-ID** (zie hierboven)
  - o Artscod: **TNOG01**
  - o Bij opmerking rapportage: **Studie-ID** (zie hierboven)
  - o Testcod: **TNOG2**

### MONSTERBEHANDELING

Materiaal	Centrifugeren APO05405, progr.nr. 1	Verdelen	Opslag
2x 6ml rode buizen	Afdraaien op routine programma	Serum afpipetteren en overbrengen in de 4 stuks geëtiketteerde verdeelbuisjes	Invriezen -80°C
2 stuks 2ml moeder-melk in cupjes	N.v.t.	N.v.t.	Invriezen -80°C
2 stuks 2ml urine in cupjes	N.v.t.	N.v.t.	Invriezen -80°C

### ANALYSE

N.v.t.

### RAPPORTAGE

N.v.t.

Z.O.Z.

**OPSLAG**

Invriezen in -80 vriezer. Monsters worden 3x per jaar opgehaald door het studieteam, tenzij Certe aangeeft dat het omwille van de ruimte in de vriezer eerder moet worden opgehaald.

**BEWAREN FORMULIEREN**

Dit formulier bewaren in de blauwe map, getiteld 'NOGBS', te vinden op de administratie van het laboratorium.

---

**Bijzonderheden**

---